

# HANDLEIDING voor afname van fecesmonster met OmicSnapMeta buisje **OM**




## U ONTVANGT



1 x aanvraagformulier



1 x OmicSnapMeta  
buisje  
(met stabilisator)

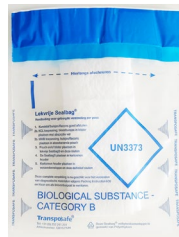

1 x sealbag  
met vliesdoek



1 x fecesvanger

### Omschrijving

De OmicSnapMeta Tube is een aal-in-one systeem waarmee leken op een eenvoudige manier een specifieke hoeveelheid feces kunnen verzamelen. Het zorgt ervoor dat het monster gestabiliseerd wordt, zodat het later in het laboratorium kan worden gebruikt voor de analyse van metabolieten en laagmoleculaire verbindingen.

### Veiligheidsinstructies:

Drink de inhoud van het fecesbuisje niet op, vermijd direct contact met de vloeistof. Na huidcontact de aangetaste gebieden onmiddellijk grondig wassen. Buiten bereik van kinderen houden. Was/desinfecteer altijd de handen na afname van het fecesmonster. Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Immundiagnostik AG en de nationale regelgevende instanties. Deze afnameset is vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met verordening (EU) 2017/746 (IVDR).



**Producent:**  
Immundiagnostik AG  
Stubenwald-Allee 8a  
64625 Bensheim, Germany  
Tel.: +49 6251 70190-0  
Fax: +49 6251 70190-363  
info@immundiagnostik.com  
www.immundiagnostik.com

**Distributie via:**  
biovis Diagnostik MVZ GmbH  
Brüsseler Str. 18  
65552 Limburg-Eschhofen  
Tel.: +49 6431 21248 0  
Fax: +49 6431 21248 66  
info@biovis.de

**biovis.de**



**ALS U NOG VRAGEN  
HEEFT, NEEM DAN  
CONTACT OP MET UW  
BEHANDELAAR.**

**REF** KV 10022 META

**IVD** In-vitro diagnostiek

**LOT** Chargennummer

**UDI** Unique Device Identifier

Temperatuurbeperring: 2-23°C


Bruikbaar tot

Niet hergebruiken



# HANDLEIDING


1. Leg alle onderdelen voor u klaar.  
Plaats de fecesvanger op de toiletbril.

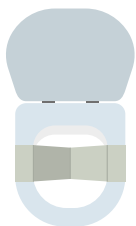

## BELANGRIJK

**De feces mag niet in contact komen met de toiletpot of het water.**

2. Zet het fecesbuisje recht op zodat de vloeistof niet kan uitlekken. Schroef het gele deksel van de fecesbuis **tegen de klok** in los en haal de monsterlans eruit.

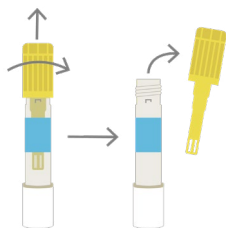


## BELANGRIJK


**Het witte deksel moet gesloten blijven en mag niet geopend worden.**

3. Prik met de monsterlans op minstens 4 plaatsen in de feces totdat het gaatje in de lans gevuld is.


Schep geen feces met de lepel in de lans.

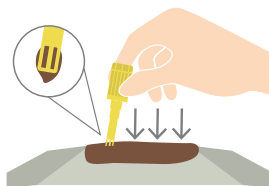

4. Strijk overtollige feces van de voorkant van de monsterlans af.

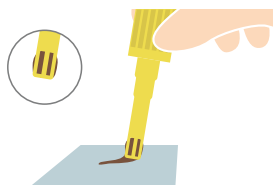


5. Plaats de monsterlans terug in het busje en schroef het gele deksel dicht totdat er een weerstand ontstaat en het niet meer open kan.

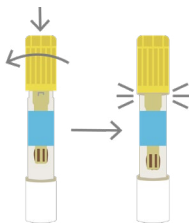


6. Zwenk het busje vervolgens een paar keer heen en weer.

**Niet schudden a.u.b.**

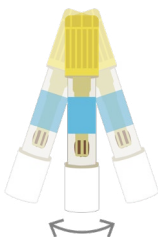

# Monsterafname - OmicSnap buisje

7. Verwijder de fecesvanger van de toiletbril. De fecesvanger is oplosbaar in water en kan door het toilet gespoeld worden.

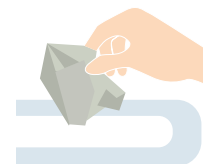


8. Het monsterbuisje zijn voorzien van een barcode.


Mocht dat niet zo zijn, schrijf dan uw naam en geboortedatum op het busje.



9. Vul de datum en tijd van monsterafname in op het aanvraagformulier en onderteken het formulier.

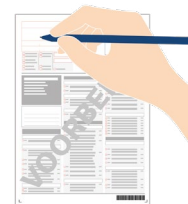

10. Plaats het busje in de sealbag en plak deze dicht. Plaats de sealbag en het ondertekende aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht.

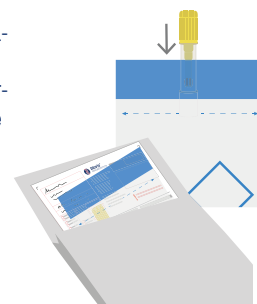

11. Geef de envelop bij voorkeur af bij een PostNL-locatie of gebruik een brievenbus voor medische post.

**Niet versturen op vrijdagen, in het weekeinde of op feestdagen.**

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of therapeut.

